



ReGen

DOE PACEMAKERS USADOS



ReGen

**Associação ReGen
uma campanha médico-veterinária**

Evite desperdício médico.
Facilite acesso a terapêuticas veterinárias.
Ajude a salvar vidas animais.

Em colaboração com a ANEL:



Contactos:

info@regen.ngo
regen.ngo



Doação de Pacemaker

A ReGen é uma associação médico-veterinária portuguesa sem fins lucrativos.

Sempre que um Pacemaker é removido acaba eliminado como resíduo médico. Uma grande parte destes dispositivos estão totalmente funcionais e são viáveis para reutilização. Em animais com problemas cardíacos, estes dispositivos são infelizmente muitas vezes negados devido ao seu custo elevado. A ReGen promove a recolha, limpeza, esterilização e reutilização de dispositivos médicos para veterinários e pacientes animais que sofrem de doença cardíaca.

Em 2023, a ReGen estabeleceu um protocolo de colaboração com a ANEL (Associação Nacional de Empresas Lutuosas) para facilitar a criação uma rede de doação de Pacemakers.

Ao doar este dispositivo evita desperdício médico e facilita a alguém acesso a terapêuticas médico-veterinárias avançadas a custo muito reduzido. Está a ajudar a salvar vidas animais.

Sou o representante legal autorizado e concordo em doar o(s) Pacemaker(s) à ReGen. Li, compreendi e aceito a informação descrita neste formulário:

Nome do representante legal autorizado (legível)

Assinatura do representante legal autorizado

Data e local

Agradecemos muito a sua colaboração!

Protocolo de Recuperação e Descontaminação de Pacemakers

1. Pacemakers encontram-se geralmente na região torácica superior esquerda.
2. Identificar a região e fazer uma incisão 1-2 cm acima do Pacemaker.
3. Dissecar o aparelho com pinças hemostáticas atenuadas / não afiadas. Atenção para não riscar ou danificar o dispositivo.
4. Após dissecar a toda a volta do dispositivo, puxar / remover o Pacemaker com os dedos até ficar preso apenas pelos cabos.
5. Cortar o(s) cabos aproximadamente a 4-5 cm de distância do aparelho.
6. Lavar o Pacemaker com água morna e sabão.
7. Desinfetar (amónia quaternária ou peróxido de sódio) o dispositivo.
8. Colocar cada dispositivo em envelope individual, juntamente com o seu formulário de doação correspondente.
9. Envie o dispositivo para a ANEL:

ANEL Associação Nacional de Empresas Ltuosas
Rua Cidade de Quelimane, 3 A
1800-121 Lisboa